




鼻咽頭・鼻腔ぬぐい液 RT-PCR検査用 専用容器取扱説明書

壁に貼ってご確認ください

(セット内容)

- ・ぬぐい液保存容器 (赤いキャップの試験管)
- ・鼻咽頭ぬぐい用スワブ
- ・ラベルシール
- ・患者様への説明資料
- ・チャック袋2枚

採取日	月	日	性別	男・女
カナ	ラベルシール			
氏名				

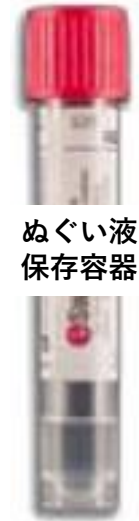

(常備容器の保存方法)

- ・冷暗所 (4~25°C) にて保管してください。
- ・直射日光が当たらないようにしてください。
- ・**使用期限**は容器のラベルに記載されています。
(6ヶ月間)

(使用方法)

- ①ぬぐい液保存容器を反時計回りにまわしてキャップを外す。
- ②検体を拭ったスワブを、保存容器に入る長さ (90mm以内) にカットする。
- ③保存容器にスワブを挿入し、時計回りにまわして蓋をしっかりと閉める。
- ④検体名などを記入したラベルシールを保存容器に貼る。
- ⑤チャック袋に入れ、立てた状態で検体回収まで冷蔵保存する。

容器の請求先
お問い合わせ

別府市医師会地域保健センター (検査)

0977-23-2278